



Przed przystąpieniem do użytkowania wyrobu, należy uważnie zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji. Wyrób należy użytkować zgodnie z zaleceniami podanymi w instrukcji. W przypadku wątpliwości dotyczących zastosowania wyrobu, należy skonsultować się z lekarzem.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Materac rehabilitacyjny ZEUS



JANPOL
FABRYKA MATERACY

Fabryka Materacy JANPOL Sp. z o.o.
43-180 Orzesze, ul. Cynkowa 2a



1. Przewidziane zastosowanie

Materac typu „ZEUS” charakteryzuje się bardzo wysoką twardością z jednoczesnym zachowaniem sprężystości. Efekt ten uzyskano dzięki zastosowaniu w części środkowej płyty lateksowej, którą obłożono dwustronnie dwiema warstwami kokosu.

Materac ten zaliczany jest do materacy rehabilitacyjnych twardych.

Połączenie lateksu z kokosem gwarantuje zachowanie kształtów i parametrów użytkowych przy wysokim komforcie spania.

Zalecany jest przy niektórych schorzeniach kręgosłupa (wg zaleceń lekarza).

Przewidziane zastosowanie: łagodzenie dolegliwości bólowych kręgosłupa i kończyn.

Przeznaczenie podstawowe – sprzęt rehabilitacji leczniczej w użyciu domowym i szpitalnym.

Do rehabilitacji w użyciu domowym zalecane stosowanie pokrowca z podstawowej oferty handlowej.

Do rehabilitacji podstawowej szpitalnej zalecane stosowanie dodatkowego pokrowca zmywalnego lub nakładki higienicznej z możliwością prania w temp. 95st.C.

2. Zalecenia użytkowe

Po dostarczeniu materaca do mieszkania, materac należy odpakować z folii celem przewietrzenia. Specyficzny zapach może utrzymywać się przez kilka dni, w tym czasie należy wietrzyć pomieszczenie, w którym znajduje się materac.

Materac jest przeznaczony do leżenia i musi znajdować się na łóżku odpowiednio do niego dostosowanym. Długość i szerokość ramy łóżka muszą odpowiadać wymiarowi materaca. Niedopuszczalne jest ułożenie wyrobu bezpośrednio na podłodze czy powierzchni pozbawionej otworów ze względu na brak odpowiedniej wentylacji.

Materac powinien leżeć na odpowiednio dobranym drewnianym stelażu. Wymagane są stelaże, w których odległość pomiędzy listwami jest nie większa niż 6,5 cm.

UWAGA! Materac nie może być zginany, ani stosowany ze stelażami o ruchomych elementach.

Zaleca się okresowe odwracanie materaca (przód-tył oraz góra-dół) co powoduje przedłużenie żywotności.

Materac należy użytkować i przechowywać w suchym pomieszczeniu. W przypadku zamoczenia wodą, należy go niezwłocznie wysuszyć. Natomiast po zmoczeniu innymi substancjami, pokrowiec prać i dezynfekować zgodnie z wszywką.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek działań niepożądanych, należy zaprzestać używania wyrobu i skonsultować się z lekarzem.

3. Przeciwwskazania do stosowania

Nie można użytkować wyrobu u osób, u których występuje uczulenie na jakikolwiek składnik wyrobu.

4. Przechowywanie i konserwacja

Materac należy transportować i przechowywać w oryginalnym opakowaniu chroniącym przed zabrudzeniem, zanieczyszczeniem mikrobiologicznym, wpływem czynników atmosferycznych oraz uszkodzeniem.

Wyrób należy przechowywać i użytkować w pomieszczeniach suchych, pozbawionych wilgoci i nadmiernego kurzu.

Procedurę prania pokrowca należy przeprowadzić zgodnie z parametrami procesu konserwacji podanymi na wszywce. Poniżej objaśnienia zastosowanych symboli:



prać w temp. do 60 st. C



zakaz wybielania



nie suszyć mechanicznie



czyścić
w czterochloroetylenie lub
w benzynie



zakaz prasowania

5. Skład surowcowy

Ze względu na możliwość nietypowych uczuleń podajemy skład surowcowy materaca:

- poliester, wiskoza (skład tkaniny obiciowej)
- poliamid, lateks syntetyczny i naturalny, włókno kokosowe (skład wkładu materaca).